

# インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

## 採血針及びルアーアダプター付ホルダー

### 改良型販売のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、かねてより販売させて頂いております、採血針及びルアーアダプター付ホルダーにつきまして、現タイプの改良型「採血針ホルダー付(AL)シリーズ」が元メーカー(ニプロ株式会社)より、販売されることとなりました。

この為、弊社と致しましても、今後、こちらの改良型を販売させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。


尚、納品金額につきましては、現料金と変更はございません。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

## 記

### ● 変更内容:

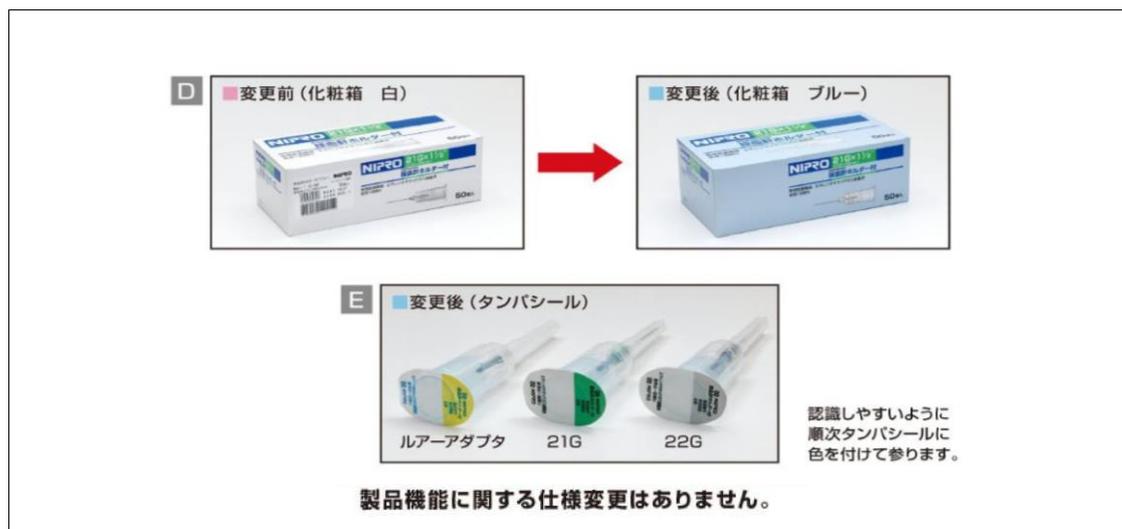

### ◆ 変更期日：平成 26 年 1 月より順次

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

ご不明な点は、弊社営業担当者までご連絡ください。

以上

## 採血針ホルダー付製品の既存品(Sタイプ)の 販売中止と新製品(ALタイプ)への切替のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度「採血針ホルダー付Sシリーズ」の改良型として『採血針ホルダー付(AL)シリーズ』を発売致します。  
そのため現行品は12月ごろより順次改良型に切り替わりますのでご了承の程よろしくお願い致します。

敬具

### 変更内容

- ホルダーの全長を現行品より長く(+5mm)する事で採血時の安定感が増しました。(写真A参照)
- ホルダー本体部分に滑り止め(リップ)を付けて採血時の安心感が増しました。(写真B参照)
- 採血針、ルアーアダプター針をホルダーに接着致しました。  
(採血時のホルダー本体と採血針のハズレ防止の為)
- 採血針のキャップに刃面側マーク●を付けて刃面側をわかりやすくしました。(写真C参照)
- 採血管の挿入時に戻る(キックバック)現象を無くしました。(規定量の採血が容易)
- 採血管を挿入する際の抵抗を現行品よりもスムーズにしました。
- 化粧箱の色を 白色→ブルー色 に変更します。(写真D参照)
- 順次、21G,22Gを認識しやすいようにホルダーのタンパシールに色を付けて参ります。(写真E参照)

### 使用上の注意

- キャップ部の外径が17.5mm以上の採血管と本品を組み合わせて使用しないこと。
- フィルム式採血管での使用方法については化粧箱のフタ部内側を参照ください。

### 変更見本

