

お客様各位

平成 28 年 3 月 吉日

16-9

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

腸内細菌検査用 提出袋変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
この度、腸内細菌検査(検便検査)用の提出袋を変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。
何卒、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

◆ 内容変更項目：

■ 腸内細菌検査（検便検査）

◆ 変更箇所

腸内細菌検査（検便検査）ご依頼時に使用頂いております提出用袋を下記のとおり変更させていただきます

(使用前)



(送付時)



2/3 程度のサイズとなります。

※ 詳細につきまして裏面をご参照下さい

◆ 変更開始期日：平成 28 年 3 月より順次変更

■ 個人提出袋使用方法

① 容器にラベルを貼付（今までと同様）



ご注意願います!


容器にネームラベルを必ず貼って下さい。
ラベルのない検体は紛失の原因になります。

② 裏面から容器を挿入 ※必ず容器を先に挿入



ここから容器を入れます




③ 容器挿入後、シール部分からめくり取る。

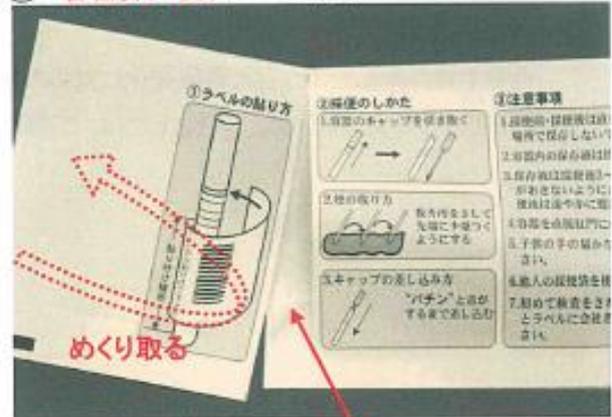

めくり取る

シール部分

④ 点線部分を谷折り

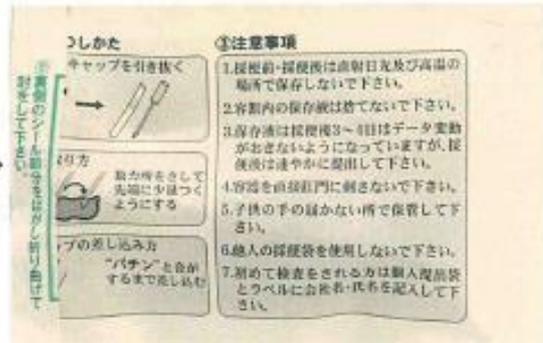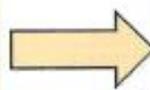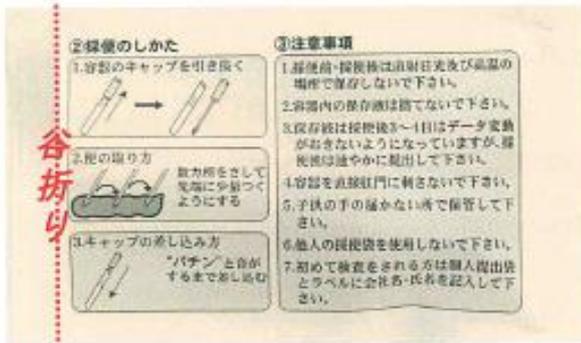

⑤ 最終的に以下ようになります。



注意)

手順が前後すると作業がやや困難となりますのでご注意ください。