

インフォメーション

登録衛生検査所 臨 床 宮 崎

T E L 0985-52-6688 F A X 0985-52-8093

検査内容変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、所要日数、基準値、報告範囲、測定場所、および報告内容を変更させていただきます。

なお、この変更に伴う検査方法、提出条件等の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

● 検査内容変更項目

■ 抗精子抗体

◆ 変更期日： 平成 30 年 4 月 2 日（月）受付分より変更

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

■ 抗精子抗体

◆検査概要:

| | 新 | 従来 |
|----------------------|---|-------------|
| 依 頼 名 | 精子不働化抗体 | 抗精子不働化抗体 |
| 検 査 材 料 (必 要 量) | 分離剤入り採血管 (血清 0.5 mL) | 同左 |
| 所 要 日 数 | 5 ~ 10 | 7 ~ 10 |
| 検 査 方 法 | 不働化法 | 同左 |
| 基 準 値 | 判定 : (-) 不働化値 : 1.40 以下 SI ₅₀ 値 : 1.0 未満 | (-) |
| 報 告 範 囲 | 判定 : (-)、(+)、強陽性 不働化値 : 0.00~20.01 以上 SI ₅₀ 値 : 1.0~1024.0 以上 または「検査不要」 | (-)、(+)、強陽性 |

■不働化値 (SIV 値) = C/T

C : 対照血清による精子運動率 (%)

T : 被検血清による精子運動率 (%)

1.40 以下 : (-)

1.41~1.99 : 判定保留*

2.00~20.00 : (+)

20.01 以上 : 強陽性

※ 不働化値が「判定保留」となった場合は、再検査して確認の上、ご報告いたします

■SI₅₀ 値

被検血清を倍数希釈し、精子不働化率が 50%となる血清希釈倍数値を「SI₅₀ 値」と致します

動化値の判定が (-) の場合、SI₅₀ 値は検査いたしません。

結果は「検査不要」で報告させていただきます。

$$\text{精子不働化率} = (C - T) / C \times 100$$

【参考文献】

香山 浩二, 他 : 日本産科婦人科学会雑誌 31, 1906-1912, 1979. 辰巳 賢一, 他 : 日本不妊学会雑誌 35, 584-588, 1990.

以上