

お客様各位

令和4年6月22日

22-14

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688

FAX0985-52-8093

翼状針・ルアーアダプター付き採血ホルダー

販売開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、**【翼状針／ルアーアダプター／ホルダー】を一体化した、「ルアーアダプター付きセーフタッチPSV®セット」**を販売させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

ご利用ご用命の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

● 販売開始項目:

■ ニプロ株式会社

「ルアーアダプター付きセーフタッチ®PSV セット」

※ 詳細につきましては、裏面をご参照ください

安全翼付針と一体型の単回使用専用の採血ホルダーです

- 翼付針、ルアーアダプター、ホルダーを一体化しているので、開封後すぐに使用できます
- 安全対策商品の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します



1箱(24個入り)
針サイズは22・23Gを
取り揃えております



エチレンオキサイドガス滅菌
済みの個包装タイプです



各ホルダー、チューブの長さは
19cmとなっております



セーフタッチ®PSVセット誤刺防止機構



ストッパー部

グリップをつけ、掴みやすくスライド操作をしやすく致しました。



1 ストッパーの両側を押さええます。



2 ロックをはずします。




3 そのまま後ろにスライドさせます。「カチッ」と音、又は手の感触があり、注射針部分が収納され針刺が防止できます。



カチッ


ロック固定

使用方法

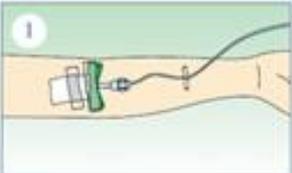


1

穿刺するときは、従来の翼付針と同じように穿刺し、翼をテープで固定します。

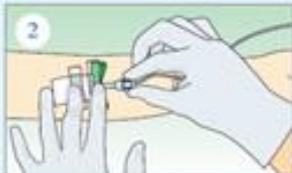

2

抜針するときは翼をテープ固定したままで行います。刺入部を中指で、ウイング部を人差し指で押さええます。ストッパーの両側を押さえ、ロックをはずし、引きます。

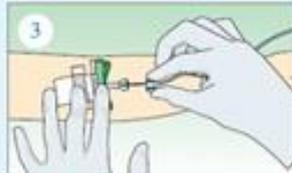

3

「カチッ」と音がするまでストッパーを完全に引き、注射針部分をウイングプロテクター内に収納固定します。



4

刺入部の止血処置をおこない、翼の固定テープを外して廃棄します。

品名	規格	注文単位
22G 翼状針付きホルダー	セーフタッチPSV22G付、チューブ長19cm	1箱(24個入り)
23G 翼状針付きホルダー	セーフタッチPSV23G付、チューブ長19cm	1箱(24個入り)

※ 販売価格に付きましては、弊社までお問い合わせ下さい

■ ご注文方法

ご注文は、下記【器材及び依頼書注文書】をご使用下さい。

該当箇所に、注文数をご記入の上、弊社へFAXまたは、弊社集荷担当までお渡し下さい。

注文日 令和 年 月 日

器材及び依頼書注文書

□施設コード()

□施設名: / 外来・病棟

施設注文者	当社受領者	器材準備者

器材名	規格	個数	納品日数	持ち出し日	担当サイン	器材コード
全血用 採血管(ニプロ 8.5ml 分離剤入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11112
血球用 採血管(ニプロ 2ml EDTA-2K入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11121
血糖用 採血管(ニプロ 2ml フッ化Na入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11131
凝固用 採血管(ニプロ 1.8ml 3.8%クエン酸入り)	1箱(50本)・・・個包装	箱	1~4日	/		11134
	1本	本	1~4日	/		11135
血沈用 採血管(ニプロ 1.6ml 3.8%クエン酸入り)	1箱(50本)・・・個包装	箱	1~5日	/		11136
	1本	本	1~4日	/		11137
血中薬物用 ヘモガードプラスプレイン管 6ml	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~3日	/		11138
	1本	本	1~4日	/		11139
EDTA-2Na入り採血管(BNP・レニン・ACTH・カテコール)	2ml・5ml・7ml 1本	本	1~3日	/		11140
アンモニア専用 採血管(テルモ 2ml EDTA-2K入り)	1本	本	1~3日	/		11141
亜鉛専用 採血管(酸洗浄済み容器)	1本	本	1~3日	/		11142
HCV/HBVウイルス 遺伝子検査用 採血管 5mL	1本	本	1~3日	/		11143
HBV-DNA定量/TMA HCV-RNAジェノタイプ専用 採血管 3mL	1本	本	1~3日	/		11144
QFT-ゴールド専用 採血管	1本	本	1~5日	/		32297
尿素呼吸気試験用 呼吸パック	1箱(20枚)	箱	1~4日	/		52001
	1セット(2枚)	セット	1~4日	/		52001
便ヘモグロビン ニュー採便容器	1日法/1セット(1本)・1箱(100本)	セット・箱	1~4日	/		42005
	2日法/1セット(2本)・1箱(100本)	セット・箱	1~4日	/		42001
尿スピッツ(滅菌済み)	1袋(10本)	袋	1~2日	/		22241
スポイド付き喀痰処理器(滅菌済み)	1袋(5本)	袋	1~2日	/		22234
血液ガス検査 採取キット(スミス)	1・2・5・10本 / 1箱(25本)	本・箱	1~2日	/		62001
細菌検査用 カルチャスワブ(オレンジキャップ)	1袋(50本)	袋	1~2日	/		22230
	1本	本	1~3日	/		22231
細菌検査用 カルチャスワブ(青キャップ)	1袋(50本)	袋	1~2日	/		22232
	1本	本	1~3日	/		22233
細菌検査用 カルチャーボトル	嫌気(橙) + 好気(青)	セット	1~2日	/		22235
	嫌気(橙キャップ)1本	本	1~3日	/		22236
	好気(青キャップ)1本	本	1~3日	/		22237
病理組織容器	赤キャップ(瓶) 中・大	個	1~2日	/		22300
	白キャップ 小・中・大	個	1~2日	/		22301
ニプロ 22G採血針付きホルダー	1箱(50本)	箱	1~4日	/		12245
ニプロ ルアーアダプター付きホルダー	1箱(50本)	箱	1~4日	/		12249
ニプロ ルアーアダプター	1箱(100本)	箱	1~4日	/		12351
ニプロ ホルダーS(ホルダーのみ)	1袋(50個)	袋	1~5日	/		11948
ニプロ 22G 翼状針付きホルダー	1箱(24個)	箱	1~4日	/		12353
ニプロ 23G 翼状針付きホルダー	1箱(24個)	箱	1~4日	/		12354
細胞診検査 婦人科用 Rover Cervexブラシ(大)	1箱(100本)	箱	1~5日	/		22210
細胞診検査 婦人科用 Endo CervexブラシS(小)	1箱(100本)	箱	1~5日	/		22223
細胞診検査 婦人科用 プレザープサイト液20ml容器	1箱(50個)	箱	1~5日	/		92212

その他の器材(器材名を下の空欄にご記入下さい。)

依頼書名	枚数	納品日数	持ち出し日	担当サイン	器材コード
臨床検査 依頼書	枚	1日~2日			
細菌検査 依頼書	枚	1日~4日			
細胞診検査 依頼書	枚	1日~4日			
病理組織損断 依頼書	枚	1日~2日			
集団検査 依頼書	枚	1日~2日	/		
アレルギー専用 依頼書	枚	1日~2日	/		
検査録 台紙 A4・B5・B5三つ折	枚	1日~2日	/		

その他の依頼書(依頼書名を下の空欄にご記入下さい。)

*お手数ですが該当する欄にご記入の上、回収担当者にお渡し下さいます様ご協力お願い致します。

*注文後、納品させて頂くまでお時間を頂く場合もございますので、お早めにご注文下さい。

㈱臨床宮崎

TEL(0985)52-6688

FAX(0985)52-8093

以上