

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688

FAX0985-52-8093

病理組織検査用「ホルマリン液入り容器」

販売開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、病理組織検査用の「ホルマリン液が容器に分注された」下記製品を販売させて頂く事となりましたので、ご案内申し上げます。

ご利用ご用命の程、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

謹 白

記

● 販売開始項目:

- 20%ホルマリン液入り容器
- 10%中性緩衝ホルマリン液入り容器

※ 各容器、1個単位からの販売が可能です

※ 施設様におかれましては、こちらを転売・譲渡されない限り、ホルマリン取扱いに付きましての「**毒物劇物取り扱い責任者**」設置の必要はございません

※ 本製品は劇物に区分される為、院内での保管は、毒物・劇物専用の**鍵付き保管庫**にて行ってください
(保管庫へは「医薬用外劇物」の記載が必要となります)

※ 納品の際は、弊社からお持ちさせて頂く、譲受書へ施設様・受取人の氏名・住所・職業のご記入と押印をお願いさせていただきますので予めご了承下さい
(法人の場合は、主たる事務所の所在地)

※ ご注文から納品まで、1週間程度を要する場合がございますので、予めご了承ください

※ 価格につきましては、弊社又は弊社担当まで申しつけ下さい

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

◆販売開始期日:令和5年4月より順次

■ ホルモン液入り容器 商品概要

コード	商品名	規格
503	20%ホルモン液入り容器（中）	1 個
504	20%ホルモン液入り容器（大）	1 個
505	10%中性緩衝ホルモン液入り容器（中）	1 個
506	10%中性緩衝ホルモン液入り容器（大）	1 個

「中」容器・実寸大	「大」容器・実寸大
ホルモン容量 25mL	ホルモン容量 40mL
↑ 高さ 68.5 mm ↓	↑ 高さ 78.5 mm ↓
← 直径 40 mm →	← 直径 43 mm →

- ※ 封入される組織の大きさにより「大・中」各容器をご使用下さい
- ※ 上記の各「大・中」容器は、現在、ご利用頂いております白プラスチックキャップ大・中容器と、ほぼ同容量となっております
- ※ 通常の組織診断をご依頼される場合は「20%ホルモン液入り容器」をご使用下さい
- ※ 病理診断確定後に、オンコマインDx/AmoyDx/RAS・BRAF 融合遺伝子/マイクロサテライト不安定検査/HER2 タンパク・FISH/PD-L1 タンパク/EGFR/ER・PgR等の遺伝子検査や遺伝子免疫染色検査を実施予定の場合は「10%中性緩衝ホルモン液入り容器」をご使用下さい

■ 容器の保管について

■ 毒物劇物の盗難・紛失を防止しなければなりません。

保管場所は、鍵のかかる丈夫なものにし、必ず施錠し、鍵の管理を徹底しなければなりません。

他のものと区別して保管してください。

敷地境界線から十分離すか、一般の人が容易に近づけない措置を講じてください。

管理者が目の届くところに保管してください。

保管、陳列されている毒物劇物の在庫量の定期的点検、使用量の把握をしてください。（見本添付）

運搬中は、容器が落下、転倒等することのないよう車両に積載するとともに、運搬先での受け渡し時に、品名、数量確認等を徹底し、紛失を防止してください。

使用していない不要な毒物劇物は、早く適切に処分しましょう。

- 保管、貯蔵、陳列場所には「医薬用外」の文字、毒物については「毒物」の文字。劇物については「劇物」の文字を表示しなければなりません。



