

お客様各位

令和7年1月30日

25-3

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688

FAX0985-52-8093

「気管吸引用キット」販売開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、気管支、気管、口腔内の分泌液や内視鏡検査での細菌検査などにてご利用頂けます、下記キットを**個包装販売**させて頂くこととなりましたのでご案内申し上げます。

ご利用ご用命の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記


● 販売開始項目:

■ 気管吸引用キット

◆ 販売開始期日:令和7年2月1日(土)より

※ 詳細につきましては、裏面をご参照ください

気管吸引用キット

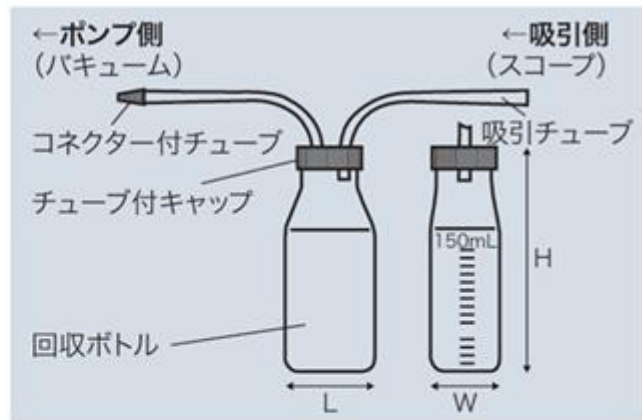

使用方法

1. 吸引側チューブを気管支用スコープの吸引口又は吸引カテーテルに接続します
2. コネクター付チューブを吸引源に接続します。
3. 吸引が働くと気管内の分泌液が回収ボトルに吸い込まれます。その際回収液が吸引源に吸い込まれないよう回収ボトルを垂直に保ってください。
(吸引カテーテル付の製品は、吸引調節口を押えることにより、分泌液が回収ボトルに吸い込まれます。)
4. 採取後、チューブ付キャップを外しスペアキャップで閉じます。
5. ネーミング用ラベルに患者の名前を記入し回収ボトルに貼ります。

還沈管		接続部		JANコード	販売単位	販売価格
寸法 (内径×長さ)	容量	ポンプ側	吸引口側			
30mm×114mm	50mL	オスコネクター	内径6.1mm テーパーチューブ	4545499001627	1個から (個包装)	税別 550円

※ ご注文につきましては「器材注文書」備考欄にご記入頂くか、弊社までお問合せください